



## Alza water per disabili e anziani in polipropilene h9102

Sedile rialzato per wc ideale per disabili ed anziani dotato di apertura frontale in polipropilene. Dimensioni mm: l 365 x h 165 x p 405.

Sedile rialzato per wc ideale per tutte le persone, disabili, anziani o coloro che sono temporaneamente infermi, che hanno difficoltà nel sedersi e nell'alzarsi dal wc. Dotato di apertura frontale in polipropilene, materiale isolante, resistente agli urti e che garantisce di una superficie estremamente liscia. Per una corretta pulizia detergere con acqua e prodotti neutri senza solventi e abrasivi.

### Caratteristiche tecniche

- made in italy
- marchio CE
- materiale: polipropilene
- apertura frontale in polipropilene
- colore bianco latte
- larghezza: 36,5 cm
- profondità: 40,5 cm
- altezza: 16,5 cm
- alzata: 10,5 cm
- portata max di 200 kg
- elementi di fissaggio inclusi nel prodotto

### Istruzioni di montaggio

- Inserire le staffe laterali di bloccaggio nell'alzawater: capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull'alzawater.
- Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc.
- Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc.
- Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente

- **Altezza** 16,5 cm
- **Larg.** 36,5 cm
- **Profondita** 40,5 cm
- **portata** 200 kg
- **Materiale** polipropilene
- **Alzata** 10,5 cm