



Alzawater in polipropilene con coperchio h11505

Rialzo WC con coperchio realizzato in polipropilene bianco e disponibile in tre altezze: 6 cm, 10 cm e 14 cm. Made in Italy. Colore: bianco.

Alzawater pensato e progettato per tutte quelle persone che hanno difficoltà nel sedersi o nell'alzarsi nell'uso del water come anziani e utenti in fase post-operatorio. Il coperchio gli conferisce un design decisamente superiore. E' testato per una portata di 340 kg e può essere utilizzato anche come seduta.

La seduta è ergonomica ed è caratterizzata da due aperture una nella parte frontale e una nella parte posteriore che permettono un migliore accesso per l'igiene personale. Inoltre la leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta l'utente a mantenere una postura corretta e permette una riduzione della flessione dell'anca e dell'articolazione del ginocchio.

Prodotto in polipropilene, garanzia di durata e robustezza, e dotato di superficie lucida facile da pulire e resistente alle macchie e agli odori.

L'alzawater h11505 è adatto alla maggior parte dei water, viene fissato in maniera stabile e sicura grazie ad un meccanismo di bloccaggio in nylon caratterizzato da due staffe laterali regolabili in larghezza. Si tratta di un sistema che permette una facile e veloce applicazione e rimozione dell'alzawater, anche a coloro che abbiano disfunzioni alle articolazioni della mano.

Caratteristiche tecniche:

- materiale: polipropilene
- colore: bianco
- seduta ergonomica
- superficie lucida
- coperchio
- manopola di bloccaggio
- larghezza seduta: 36,5 cm
- profondità seduta: 40,5 cm
- altezze disponibili: 6, 10 e 14 cm
- portata massima: 340 kg

Istruzioni per l'installazione

Inserire le staffe laterali di bloccaggio nell'alzawater: capovolgere l'alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull'alzawater. Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l'accostamento dell'alzawater sulla ceramica del wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc e appoggiare sulla ceramica del wc l'alzawater con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l'alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente.

INFORMAZIONI

- **Larg.** 36,5 cm
- **Profondita** 40,5 cm
- **portata** 200 kg
- **Materiale** polipropilene