



Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8915

Sedia a rotelle da doccia con telaio in alluminio bianco anticorrosivo, 4 ruote piroettanti e poggipiedi rimovibili. Larghezza seduta 50 cm. Portata 150 kg

Carrozzina da utilizzare sia come sedia da doccia che come toilette. E' caratterizzata da telaio in alluminio anticorrosivo trattato bianco ed è dotata di 4 ruote piroettanti, di secchio wc con coperchio e di poggipiedi estraibili e rimovibili. La seduta ad altezza regolabile e lo schienale sono realizzati in poliuretano morbido per prevenire piaghe da decubito.

Scheda tecnica:

- telaio in alluminio trattato bianco
- 4 ruote frenate e piroettanti da 5"
- seduta, schienale e poggipiedi in poliuretano morbido
- poggipiedi estraibili e regolabili
- secchio wc con coperchio
- larghezza seduta 50 cm
- profondità seduta 43 cm
- altezza seduta 50 - 55 cm regolabile
- altezza max. superabile (WC) 42 - 47 cm regolabile
- larghezza totale (con braccioli) 61 cm
- profondità totale 93 cm
- altezza totale 96 - 101 cm regolabile
- portata massima 150 kg
- peso 13,50 kg
- marchio CE (conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici)
- garanzia 2 anni

Ribaltamento dei braccioli

- questa funzione può agevolare la salita o discesa dell'utente dalla carrozzina
- durante la doccia, il ribaltamento dei braccioli permette anche una migliore igienecorporea durante l'uso non lasciate mai incustodita la carrozzina con i braccioli ribaltati
- per ribaltare i braccioli ribaltate i braccioli all'indietro, alzandoli nella parte anteriore
- per riposizionare nuovamente i braccioli, ribaltateli in avanti premendo sulla parte anteriore

Regolazione dei poggipiedi all'altezza desiderata

- l'altezza dei poggiapiedi della carrozzina deve essere adattata all'utente
- l'altezza è regolata correttamente, se ad utente seduto, le sue cosce appoggiano correttamente sulla seduta ed i suoi piedi poggiano sui poggiapiedi
- per regolare l'altezza dei poggiapiedi, toglieteli dalla carrozzina
- togliete la vite di fissaggio regolate l'altezza dei poggiapiedi, inserendo o estraendo il tubo internore
- inserite ed avvitate la vite di fissaggio

Regolazione dell'altezza della seduta

- l'altezza della seduta deve essere adattata all'utente ed è regolata correttamente, se l'utente seduto poggia regolarmente i piedi per terra
- regolare l'altezza della seduta solo a carrozzina vuota
- per la regolazione d'altezza afferrare la clip ed estrarla
- regolate il tubo telescopico sull'altezza desiderata
- inserite la clip nel foro previsto
- regolate sempre tutti i tubi telescopici alla stessa altezza
- non effettuare regolazioni durante l'uso della carrozzina!

INFORMAZIONI

- **Altezza** regolabile
- **Larg.** 61 cm
- **Profondità** 93 cm
- **portata** 150 kg
- **Materiale** alluminio

Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8915



Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8915

Altezza: regolabile

Larg.: 61 cm

Profondità: 93 cm

Portata: 150 kg

Materiale: alluminio