



Carrozzina da doccia basculante h8916

Carrozzina da doccia basculante con telaio in alluminio anticorrosivo, 4 ruote piroettante e poggiatesta regolabile. Porta max: 150 kg

Carrozzina da doccia che permette di stare seduti nel bagno o nella doccia e può essere anche usata come WC. Può essere usata anche per il trasporto di persone da e verso il bagno o WC.

E' dotata di una funzione basculante che permette di inclinare la seduta da da -5° a +25°. Per attivare la funzione basculante tirare verso l'alto la leva di basculamento che si trova sul manubrio di spinta.

E' equipaggiata con 4 ruote frenate da 5", con secchio WC estraibile con coperchio e con poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. La seduta è inoltre provvista di un apertura centrale per l'utilizzo del secchio montato sotto la seduta stessa.

La carrozzina comoda basculante h8916 è fornita disassemblata in un imballo di cartone.

La fornitura è composta dalle seguenti parti:

- 1 telaio portante con seduta in PUR nero
- 1 schienale con poggia-schiena in PUR nero e braccioli
- 1 poggiatesta asportabile e regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
- 2 poggiapiedi asportabili e regolabili in altezza
- 4 ruote asportabili, con freno di stazionamento
- 1 secchio WC con manico e coperchio
- 1 coperchio in PUR nero per l'incavo nella seduta
- un manuale

Scheda tecnica:

- braccioli ribaltabili
- portata max. 150 kg
- peso 15,10 kg

- profondità di seduta 43 cm
- larghezza di seduta 45
- altezza seduta: 55-60 cm
- larghezza tot. 56 cm
- profondità tot. 110-120 cm
- altezza tot. 97-141 cm
- basculamento da -5° a +25°
- marchio CE conforme alle direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 appendice I concernente i dispositivi medici

Assemblaggio:

- Girate il telaio portante all'insù e poggiatelo per terra in modo che nei 4 tubi vediate i fori ove andranno inseriti i tubi verticali con le ruote
- Montate le 4 ruote inserendone ciascun tubo verticale fino alla battuta nei fori del telaio.
- Fissate ora con le viti passanti in dotazione ogni ruota al telaio.
- Controllate bene che le ruote siano fissate provando a rimuovere le ruote cercando di estrarre il tubo dal telaio.
- Ora rigirate il telaio nella posizione giusta in modo che appoggi sulle 4 ruote
- Prima di continuare con l'assemblaggio bloccate tutte le ruote premendo con la punta del piede sulle linguette freno che trovate su ciascuna delle ruote
- Per rilasciare i freni dopo l'assemblaggio alzate da sotto con la punta del piede le linguette freno
- Inserite i tubi inferiori dello schienale nei fori posti sulla parte posteriore del telaio
- Fissate lo schienale al telaio avvitando le due viti a manopola in modo che lo schienale sia bloccato al telaio
- Inserite il tubo verticale del poggiatesta nell' incastro del supporto fissato al manubrio di spinta della carrozzina
- Dopo aver registrato il poggiatesta all'altezza desiderata, fissatelo al supporto stringendo la manopolina a stella in modo che non si lasci più spostare verso l'alto o il basso
- Ponete il coperchio sul secchio WC
- Inserite il secchio da dietro nei binari di supporto posti sotto la seduta e spingetelo in avantifino alla battuta
- Ponete la copertura in PUR nero sul foro per il WC
- Inserite i poggia-gambe girati verso l'esterno nei fori anteriori del telaio
- Girate ora i poggia-gambe di 90° verso l'interno finché sentite lo scatto di bloccaggio
- Controllate che non si lascino girare senza tirare la levetta di bloccaggio, altrimenti non sono inseriti in modo corretto

INFORMAZIONI

- **Altezza** regolabile
- **Larg.** 56 cm
- **Profondità** 120 cm
- **portata** 130 kg
- **Materiale** alluminio

Carrozzina da doccia basculante h8916



Carrozzina da doccia basculante h8916

Altezza: regolabile

Larg.: 56 cm

Profondita: 120 cm

Portata: 150 g

Materiale: alluminio