



Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8914

Carrozzina da doccia con telaio in alluminio anticorrosivo trattato bianco e 4 ruote da 5". Seduta in pur morbido larghezza 45 cm. Portata 150 kg

Sedia a rotelle da doccia ideale per fare la doccia da seduto per tutte le persone che hanno una mobilità estremamente ridotta. Il telaio in alluminio anticorrosivo garantisce durata nel tempo e la seduta, lo schienale e i poggipiedi in poliuretano morbido evitano l'insorgere di piaghe da decubito.

E' equipaggiata di 4 ruote frenate da 5" ed è dotata di secchio wc con coperchio im modo da poter essere utilizzata sia come sedia da doccia che come toilette. i poggipiedi sono estraibili e regolabili e l'altezza della seduta è regolabile

Scheda tecnica:

- telaio in alluminio trattato bianco
- 4 ruote frenate da 5"
- seduta, schienale e poggipiedi in poliuretano morbido
- poggipiedi estraibili e regolabili
- larghezza seduta 45 cm
- profondità seduta 43 cm
- altezza seduta 50- 55 cm regolabile
- altezza max. superabile (WC) 42 - 47 cm regolabile
- larghezza totale (con braccioli) 56 cm
- profondità totale 93 cm
- altezza totale 96 - 101 cm regolabile
- portata massima 150 kg
- peso 12,90 kg
- marchio CE (conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici)
- garanzia 2 anni

Ribaltamento dei braccioli

- questa funzione può agevolare la salita o discesa dell'utente dalla carrozzina
- durante la doccia, il ribaltamento dei braccioli permette anche una migliore igienecorporea durante l'uso non lasciate mai incustodita la carrozzina con i braccioli ribaltati
- per ribaltare i braccioli ribaltate i braccioli all'indietro, alzandoli nella parte anteriore

- per riposizionare nuovamente i braccioli, ribaltateli in avanti premendo sulla parte anteriore

Regolazione dei poggiapiedi all'altezza desiderata

- l'altezza dei poggiapiedi della carrozzina deve essere adattata all'utente
- l'altezza è regolata correttamente, se ad utente seduto, le sue cosce appoggiano correttamente sulla seduta ed i suoi piedi poggiano sui poggiapiedi
- per regolare l'altezza dei poggiapiedi, toglieteli dalla carrozzina
- togliete la vite di fissaggio regolate l'altezza dei poggiapiedi, inserendo o estraendo il tubo internore
- inserite ed avvitate la vite di fissaggio

Regolazione dell'altezza della seduta

- l'altezza della seduta deve essere adattata all'utente ed è regolata correttamente, se l'utente seduto poggia regolarmente i piedi per terra
- regolare l'altezza della seduta solo a carrozzina vuota
- per la regolazione d'altezza afferrare la clip ed estrarla
- regolate il tubo telescopico sull'altezza desiderata
- inserite la clip nel foro previsto
- regolate sempre tutti i tubi telescopici alla stessa altezza
- non effettuare regolazioni durante l'uso della carrozzina!

INFORMAZIONI

- **Altezza** regolabile
- **Larg.** 56 cm
- **Profondità** 93 cm
- **portata** 130 kg
- **Materiale** alluminio



Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8914

Altezza: regolabile

Larg.: 56 cm

Profondità: 93 cm

Portata: 150 g

Materiale: alluminio