



Sponda universale ribaltabile Termigea h23058

Barriera letto anziani realizzata in tubolare di acciaio verniciato bianco. Dotato di attacco a morsetto, regolabili attraverso pomelli. Dimensioni base: 165x40 cm.

Sponda anticaduta universale singola adattabile ai letti da degenza e tradizionali, singoli o matrimoniali; struttura realizzata in tubolare di acciaio verniciato bianco. La sponda è dotata di attacco a morsetto, regolabile attraverso due pomelli, che permettono il montaggio su telai con un profilo che misura da un minimo di 1,8 cm ad un massimo di 4,5 cm. La manopola posizionata all'interno dell'asola permette la regolazione verso la testa o i piedi del paziente e consente inoltre di ribaltare completamente la sponda senza doverla smontare.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: tubolare d'acciaio verniciato bianco da 2,54 cm
- Ribaltamento di 180°
- Regolazione verso testa e piedi del paziente tramite pomelli
- Dimensioni base: 165 x 40 cm
- Peso: 6,8 Kg
- conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Installazione e uso

Togliere le viti con il pomello di fissaggio alla base dei morsetti, regolare le rimanenti viti di fissaggio sui morsetti in base alla struttura del letto, inserire la sponda con entrambi i morsetti sul telaio del letto, rimettere le viti con i pomelli di fissaggio precedentemente tolti, regolare la posizione della sponda rispetto al letto e stringere in egual modo i pomelli di fissaggio sui morsetti

I pomelli di ribaltamento e regolazione permettono, allentandoli, lo spostamento della sponda verso i piedi o verso la testa del paziente per il range consentito dalle asole. Al termine della regolazione i pomelli devono essere nuovamente strinti. Se i pomelli di ribaltamento e regolazione vengono allentati fino a liberare completamente le asole, la sponda può essere ribaltata di 180°, permettendo qualsiasi tipo di manovra sul letto o sul paziente. Al termine delle manovre la sponda deve essere rimessa in posizione e i pomelli devono essere nuovamente strinti.

INFORMAZIONI

- **Garanzia 1 anno**